

ThermaCare Parches Térmicos Terapéuticos - SPORT

ALIVIO EFICAZ DEL DOLOR

CLÍNICAMENTE PROBADO para reducir el dolor después del ejercicio intenso.

- Células térmicas patentadas.
- 3 parches térmicos
- No contiene medicamentos
- 8 horas de calor constante

Finalidad prevista: Alivio efectivo y específico del dolor de músculos y/o articulaciones asociado con:

- esfuerzo excesivo
- esguinces y torceduras
- artritis
- tensión muscular

Indicado para quienes padecen dolores agudos, crónicos y ocasionales.

El producto está indicado para una población de pacientes autosuficientes mayores de 12 años. Consulte las advertencias para conocer las limitaciones de uso.

Instrucciones de uso:

- Abra la bolsa cuando esté listo para usar el producto.
- No corte la bolsa.
- Retire el papel dejando al descubierto la cara adhesiva.
- Coloque el parche sobre el área de dolor con el adhesivo hacia la piel. Consulte la sección **No utilizar** para ver las áreas donde no se debe aplicar.
- ThermaCare puede tardar hasta 30 minutos en alcanzar la temperatura terapéutica deseada.
- Retire el parche después de 8 horas.

La duración del tratamiento no debe exceder los 7 días seguidos.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Este producto puede causar quemaduras/ampollas.

Revise la piel con frecuencia durante el uso.

Si encuentra irritación o quemazón, retire el producto inmediatamente.

Para usuarios que no son autosuficientes o para usuarios de 12 a 18 años: se requiere la supervisión de un cuidador. **55 años o más:** el riesgo de quemarse aumenta a medida que se envejece. Si tiene 55 años o más, no utilice ThermaCare mientras duerme.

Consulte a su médico/farmacéutico antes del uso de este producto en caso de diabetes, problemas cardíacos o circulatorios, artritis reumatoide o si está embarazada.

Deje de usarlo y consulte a un médico si experimenta alguna molestia, ardor, hinchazón, sarpullido u otros cambios en la piel que persisten donde se usa el parche y también si después de 7 días su dolor empeora o permanece sin cambios.

Cada célula térmica contiene hierro (aproximadamente 2 gramos):

- Si el hierro es ingerido consulte inmediatamente a su médico.
- Si el hierro entra en contacto con la piel o los ojos, retire el parche, aclare con agua la zona afectada y consulte inmediatamente a su médico.
- Si el parche se daña o se rasga durante el uso, retírelo.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Nunca caliente el producto en un microondas ni intente recalentarlo por otros medios, ya que el parche podría incendiarse.

No utilizar:

- Si observa células térmicas con pérdida de contenido y/o el parche está dañado o rasgado o si el envase está dañado.
- Con preparados tópicos.
- Sobre piel enferma, agrietada o con heridas
- Sobre zonas en las que haya aparecido hematoma o edema en las últimas 48h.
- En personas que no sean capaces de seguir todas las instrucciones de uso o no sean capaces de retirar por sí mismas el producto.
- Con otras fuentes de calor.
- Menores de 12 años.
- En cara/cabeza, pechos, dedos, ingle, pies y dedos de los pies, zona posterior de la rodilla, zona interior del brazo o axila, o en la parte inferior del abdomen.
- Mientras hace ejercicio.

Cuando utilice este producto: No lo utilice más de 8 horas en un período de 24 horas. No se ponga el parche demasiado ceñido y no superponga las células térmicas. No ejerza presión adicional sobre el producto, como apoyarse contra superficies duras o usar ropa interior ajustada. Si notase demasiado caliente el parche, deje de utilizarlo o retírelo del contacto directo con la piel, colocándolo sobre una capa de ropa. Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, retire el producto antes de someterse a una resonancia magnética. Mantenga seco el parche térmico. Consultar el apartado **Instrucciones de uso**. En caso de cualquier incidencia grave que ocurra en relación con el producto, informe al Fabricante, al Representante Autorizado y a las Autoridades competentes. Al final de su uso, desechar el producto una vez agotada su función de calor, de acuerdo con la normativa local de recogida de residuos domésticos, evitando la dispersión de su contenido en el medio ambiente. Este producto no requiere condiciones especiales de conservación.

Fabricante: Angelini Pharma Inc., 1231 Wyandotte Dr., Albany, Georgia, 31705, USA

Representante Autorizado en la UE: Angelini Pharma S.p.A. Viale Amelia, 70, 00181, Roma, Italy

Contacto en España: España: Angelini Pharma España, S.L., c/ Antonio Machado, 78-80, 3ª planta, módulo A-Edificio Australia. 08840 Viladecans, Barcelona (España)

Fabricado en EEUU

Fecha revisión del texto: 2026-09

CE₀₁₂₃