

Toallitas oftálmicas unidosis para la higiene periocular en niños y adultos, combinadas con una almohadilla calentable.

Indicaciones:

ESTILA FORTE es una toallita de algodón natural de un solo uso, impregnada de una solución que contiene Hy-Ter® (hialuronato sódico y extracto del árbol del té) y Aloe Vera, que ejerce una acción limpiadora, suavizante, calmante y descongestiva.

ESTILA FORTE ha sido formulado utilizando antiinflamatorios y antisépticos naturales para obtener un alivio rápido de los síntomas.

Una correcta higiene ocular es crucial en caso de situaciones potenciales o continuas de inflamación o infección.

Gracias a la formulación con Hy-Ter®, **ESTILA FORTE** está especialmente indicado para la higiene de los párpados y las pestañas en el tratamiento de blefaritis/blefaroconjuntivitis, y también en caso de chalazión y orzuelo.

En la blefaritis posterior, las glándulas de Meibomio están ocluidas. Estas glándulas de Meibomio se encuentran dentro de los párpados y segregan una componente oleoso que ayuda a evitar que la película lagrimal se evapore. El uso combinado de la toallita y el masaje de párpados con la almohadilla, permite la apertura y limpieza de estas glándulas con el fin de reanudar la producción natural de los lípidos necesarios para una película lagrimal sana.

La acción limpiadora con la toallita sola está indicada como adyuvante en el tratamiento de conjuntivitis bacterianas y alérgicas y en el tratamiento antiséptico pre- y postoperatorio.


Ingredientes:

Agua, PEG / PPG - 20/15 dimeticona, extracto de aloe barbadensis, Hy-Ter® (hialuronato sódico, 4-terpineol), glizirrizato de amonio, caprillil/capril glucósido, sal sódica de ácidos grasos del aceite de coco condensados con aminoácidos de trigo, etilhexilglicerina, fenetil alcohol, cloruro de sodio, fosfato de sodio, fosfato de disodio, PPG-26 Buteth-26, aceite de ricino hidrogenado PEG-40.

Presentación:

28 toallitas unidosis + 1 almohadilla calentable.

Uso y administración:

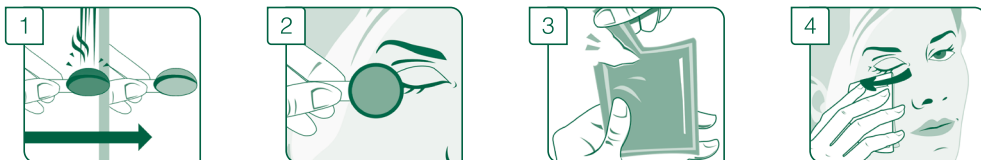

1. Calentar la almohadilla hasta que cambie de color: En este punto la almohadilla habrá alcanzado la temperatura ideal para el masaje efectivo del párpado. En el caso de que la almohadilla haya perdido la capacidad de cambiar de color con el tiempo, antes de la caducidad del producto, la actividad de calentarse aún estaría garantizada.
2. Sostener la almohadilla caliente por la solapa, masajear el párpado durante 3-5 minutos ejerciendo una ligera presión.
3. Inmediatamente después de la aplicación de la almohadilla ocular, abrir un sobre rasgando por la muesca pre-cortada y extraer la toallita.
4. Desplegar la toallita y limpiar cuidadosamente los párpados y las pestañas desde la esquina interna del ojo a la externa, manteniendo el ojo cerrado.

Cómo calentar la almohadilla ocular:

La almohadilla para los ojos se puede calentar de las siguientes maneras:

1. Manteniendo la almohadilla bajo el agua del grifo muy caliente hasta que cambie el color.
 2. Sujetando la almohadilla por la solapa, sumergiéndola en agua caliente hasta que el color cambie.
- Revisar siempre la temperatura de la almohadilla antes de masajear los ojos, tocando con ella el interior de la muñeca. Si está demasiado caliente, esperar unos minutos y volver a intentarlo.
 - Si el color de la almohadilla calentable no es uniforme, agitarla antes de usar.
 - Comprobar que la almohadilla no esté dañada antes de volver a usarla.
 - Enjuagar con agua y colocarla de nuevo en el envase una vez seca.
 - Si la almohadilla calentable no vuelve al color original de forma natural, mantener en el frigorífico durante la noche.

Efectos adversos:

No se han detectado efectos secundarios asociados con el uso del producto.
En caso de cualquier efecto secundario, consulte a su médico.

Advertencias y precauciones:

- Uso externo: sólo para aplicación sobre la zona periocular manteniendo el ojo cerrado.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes.
- En caso de sensación de quemazón persistente, debe suspenderse el tratamiento.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones para calentar la almohadilla y comprobar su temperatura.
- No reutilizar la toallita aplicada para evitar la contaminación e ineficacia del producto.
- Cada sobre está destinado a un solo uso, abrirlo justo antes de usarlo.
- No utilizar el producto en caso de que el sobre no esté sellado y / o el envase esté dañado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No perforar la almohadilla. No tragar el producto.
- Desechar la almohadilla una vez haya utilizado el último sobre.
- Si está utilizando otros medicamentos por vía tópica, espere 15 minutos antes de utilizar ESTILA FORTE.
- Debido a la falta de datos que garanticen el uso del producto durante el embarazo o lactancia, consulte con su médico o farmacéutico antes de utilizar ESTILA FORTE.
- Utilizar una toallita para cada ojo. Lavar las manos después del uso.
- No enjuagar el ojo después de la aplicación.

Condiciones de conservación:

No utilizar ESTILA FORTE después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
Conservar a temperatura ambiente y evitar el contacto con el agua.
La fecha de caducidad se refiere al producto en el envase sin dañar, almacenado adecuadamente.

Fecha revisión: Mayo 2020

 **NTC Srl**
Via Luigi Razza, 3
20124 Milán
Italia

Comercializado por:
ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.
C. Osi, 7 – 08034 Barcelona



Producto sanitario




ANGELINI
PHARMA